

Kære Kunde,

Tak for dit køb af PC-68 B håndledspulsoximeter med bluetooth funktion.

Inden opstarten beder vi altid vores kunder læse den enkelske manual til produktet, Det vil gøre en forskel, hvor du vil kunne finde svar på alt. Vi har endvidere valgt trin for trin vejledning i denne mail, så du netop undgår start problemer.

Det er ikke et must at benytte bluetooth funktionen for at uploade data, dette skal kun tilkobles hvis man ønsker trådløs dataoverførsel. I produkt pakken ligger der nemlig et USB data kabel som kan tilsluttes din PC. Forinden er det vigtigt, at ud har downloadet software til PC'en

For at bluetooth kan virke på din telefon eller PC, kræver det bluetooth v. 4.0 eller derover, endvidere kræver det som minimum at du har en bluetooth receiver i din PC; har du ikke dette, kan en sådan tilkøbes for ca. 50-100 kr. Endvidere skal bluetooth være aktiveret.

Trin for trin vejledning til dig:

1. Først downloade PC software som tager imod dataen fra PC-68B, udpak filen og installerer exe filen. <http://www.creative-sz.com/index.php?catid=31> software kan downloades under produktet på hjemmesiden.
2. Til Android Smartphone, venligst download APK filen direkte til telefonen via ovenstående link. Vælg Rød connection altid.



- 3.
4. Har du Iphone skal du besøge Apple store Søg på: "shenzhen Creative " App @Health
5. Se yderligere detaljer i produkt beskrivelsen.
6. Du kan nu uploade data over natten eller i realtime funktionen.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Mvh

Henrik Juul



HENRIK JUUL JENSEN
Indehaver

Telefon: +45 71 9696 78
Email: info@pulsoximetershop.dk
Adresse: Fjordgade 8, DK-9000 Aalborg

www.pulsoximetershop.dk



